




Pocket Container for used insulin pen needles - smart and personal

Contenant sécuritaire de poche Pour utilisation avec des aiguilles stylos. - Ingénieux et personnel

Open the container / Ouvrir le contenant



Dispose of the pen needle by unscrew it in the container /
Disposer de l'aiguille en la dévissant dans le contenant

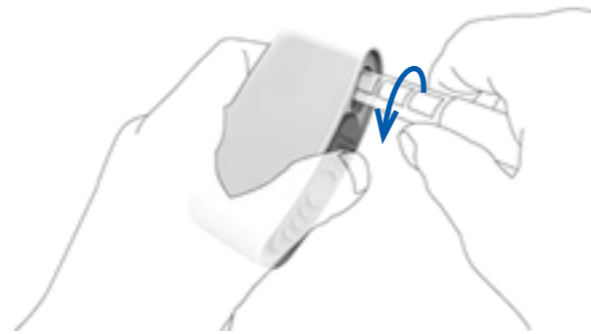

Close the container after use /
Fermer le contenant après usage



Lock the container permanently before disposal / Barer le contenant de façon permanente avant d'en disposer.



- Safe, discrete and easy to dispose of used pen needles
- Convenient to use at work and when travelling
- Suitable for all sizes of insulin pen needles
- Sécuritaire, discret et facile de disposer des aiguilles pour stylos utilisés.
- Pratique à utiliser au travail et en voyage
- Convient pour toutes les tailles d'aiguilles stylo à insuline

Can contain a minimum of approx. 25
used needles /
Contient approx. 25 aiguilles stylo
utilisées au minimum.



EXCLUSIVE CANADIAN DISTRIBUTOR

DOMREX
PHARMA

3232 JACQUES-BUREAU, LAVAL (QUEBEC),
CANADA H7P0A9
1-888-687-0990, www.domrexpharma.com

MANUFACTURED IN DANEMARK BY:

USON PLAST A/S
www.uson.dk