


Seringue 1ml avec aiguille sécuritaire – MODE D'EMPLOI

ÉTAPE 1



Serrez la seringue sur l'aiguille en utilisant une technique aseptique. **Saisissez la base de l'aiguille, pas la gaine de sécurité**, et poussez sur la seringue tout en tournant en sens horaire pour vous assurer que l'aiguille est bien fixée sur la seringue.

ÉTAPE 2

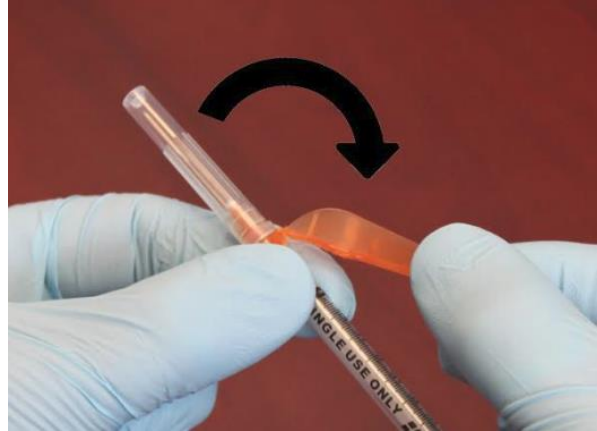

Écartez la gaine de sécurité de l'aiguille vers le corps de la seringue avant de retirer le capuchon de l'aiguille. Effectuez l'injection en respectant la technique établie. Pour la commodité de l'utilisateur, la position de l'aiguille (biseau vers le haut) est orientée vers la position de la gaine de sécurité.

ÉTAPE 3 – ACTIVATION AVEC LE POUCE



OU – ACTIVATION SUR UNE SURFACE DURE



ÉTAPE 3 : Une fois l'injection terminée, servez-vous de l'une des (2) techniques à une main présentée ci-dessus pour activer le mécanisme de sécurité. L'activation est vérifiable par un bruit audible de **“clac”** et peut être confirmée visuellement

