


SNS-BC



**DISPOSITIF POUR PRÉLÈVEMENT SANGUIN
ET PERFUSION SÉCURITAIRES**

MICRO-PERFUSEUR DE CLASSE MONDIALE

Ce dispositif à ailettes (papillon) sécuritaire de classe mondiale, offre une ponction sans douleur et un flux sanguin optimal tout en assurant sécurité pour le patient et le professionnel de la santé.

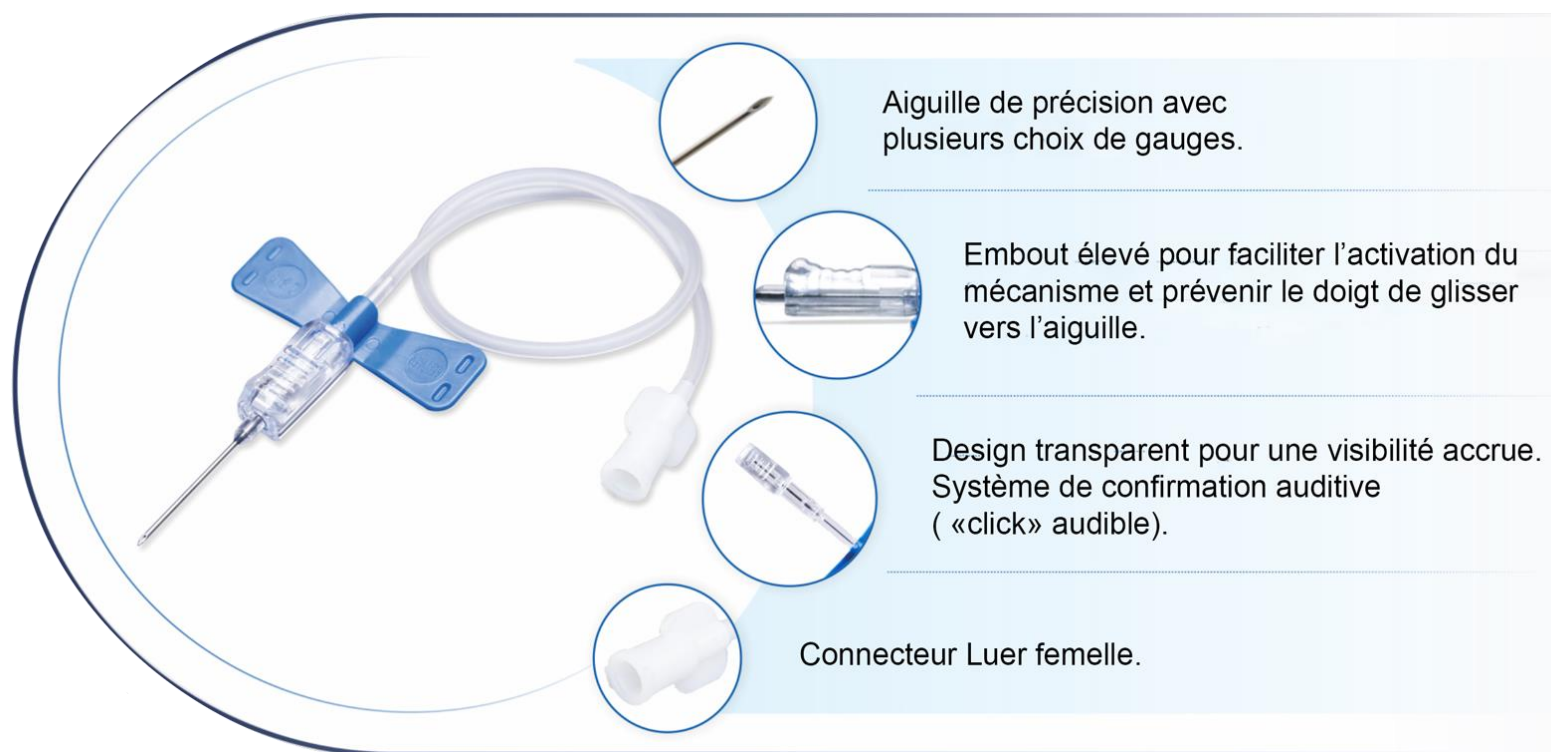

PAROI ULTRA MINCE ET POINTE AFFÛTÉE



AILETTES FLEXIBLES, MAIS ASSEZ RIGIDES ET TEXTURÉES POUR ASSURER UNE BONNE PRISE

EN MAIN



UTILISATION INTUITIVE



ACTIVATION DANS LA VEINE À UNE SEULE MAIN



TUBULURE SANS MÉMOIRE



EMBALLAGE BILINGUE ET FACILE À OUVRIR



STÉRILE/SANS LATEX/SANS DEHP

MODE D'EMPLOI & CODES DE PRODUITS



Étape 1:
Effectuer la ponction
veineuse.



Étape 2:
Insérer le tube de
prélèvement sanguin.



Étape 3:
Une fois le prélèvement
terminé, utiliser le doigt du
milieu pour couvrir le site de
ponction avec une gaze.
Placer l'index sur l'embout du
papillon pour le maintenir en
place et tirer la tubulure avec
l'autre main pour engager le
mécanisme de sécurité.



Étape 4:
Le clic audible confirmera
l'activation du mécanisme.
Jeter dans un contenant
approprié après usage.

DESCRIPTION	CODE DE PRODDUIT	IMAGE
SNS BC 21G 3/4" aiguille 10cm tubulure	SNS-LC1021	
SNS BC 23G 3/4" aiguille 10cm tubulure	SNS-LC1023	
SNS BC 25G 3/4" aiguille 10cm tubulure	SNS-LC1025	
SNS BC 21G 3/4" aiguille 19cm tubulure	SNS-LC1921	
SNS BC 23G 3/4" aiguille 19cm tubulure	SNS-LC1923	
SNS BC 25G 3/4" aiguille 19cm tubulure	SNS-LC1925	
SNS BC 21G 3/4" aiguille 30cm tubulure	SNS-LC3021	
SNS BC 23G 3/4" aiguille 30cm tubulure	SNS-LC3023	
SNS BC 25G 3/4" aiguille 30cm tubulure	SNS-LC3025	
SNS BC avec adaptateur luer 21G 3/4" aiguille 19cm tubulure	SNS-LA1921	
SNS BC avec adaptateur luer 23G 3/4" aiguille 19cm tubulure	SNS-LA1923	
SNS BC avec adaptateur luer 25G 3/4" aiguille 19cm tubulure	SNS-LA1925	
SNS BC avec adaptateur luer 21G 3/4" aiguille 30cm tubulure	SNS-LA3021	
SNS BC avec adaptateur luer 23G 3/4" aiguille 30cm tubulure	SNS-LA3023	
SNS BC avec adaptateur luer 25G 3/4" aiguille 30cm tubulure	SNS-LA3025	
SNS BC avec barillet 21G 3/4" aiguille 19cm tubulure	SNS-LH1921	
SNS BC avec barillet 23G 3/4" aiguille 19cm tubulure	SNS-LH1923	
SNS BC avec barillet 25G 3/4" aiguille 19cm tubulure	SNS-LH1925	
SNS BC avec barillet 21G 3/4" aiguille 30cm tubulure	SNS-LH3021	
SNS BC avec barillet 23G 3/4" aiguille 30cm tubulure	SNS-LH3023	
SNS BC avec barillet 25G 3/4" aiguille 30cm tubulure	SNS-LH3025	